

1



2



3



1 Entfernen Sie das Papier von der Rückseite des Wear&amp;Care Sensorstreifens

2 Platzieren Sie die Oberseite des Wear&amp;Care Sensorstreifens und legen Sie ihn der Länge nach auf das Inkomaterial

3 Befestigen Sie es ganz nach unten in der Mitte des Inkomaterials

**Hinweis: Vermeiden Sie das Inkomaterial zu öffnen**

1



2



3













1 Öffnen: Drücken Sie auf die Kante und das Ende des Wear&amp;Care Sensors

2 Platzieren: Zuerst die beiden Löcher festdrücken

3 Schließen: Deckel und Knopf am Verschluss zusammendrücken

**Hinweis: Grünes Licht zeigt an, das Sensor und Streifen in Ordnung sind**

Symbol	Bedeutung	
	Neues Inkomaterial erkannt. System OK	
	Erste Urinausscheidung erkannt. Keine Maßnahme erforderlich	
	Volles Inkomaterial erkannt. Erwägen Sie einen Wechsel	
	Maximale Tragezeit erreicht. Erwägen Sie einen Wechsel	
	Bewohner ohne Sensor. Hinweis: Keine Statuserkennung	
	Handhabung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im grauen Symbol und Text auf dem Bildschirm.	
	Niedriger Akkustand. Bitte laden Sie den Sensor	

- Hinweis:**
- » Bei guter Mobilfunkanbindung dauert die Aktualisierung des Bildschirms etwa ½ - 2 Minuten
  - » Stellen Sie sicher, dass nur geprüftes Inkomaterial genutzt wird (Tag&Nacht)
  - » Wenn auf dem Bildschirm  angezeigt wird und das Inkomaterial trocken ist, kann dies an der Kompression des Inkomaterials beim Urinieren liegen
  - » Wenn auf dem Bildschirm  angezeigt wird und das Inkomaterial voll/undicht ist, kann es an einer Verzögerung des Mobilfunksignals liegen oder das Inkomaterial wurde nicht gut genug angelegt
  - » Rotes Licht beim Schließen des Sensors: Bitte den Sensor aufladen
  - » Wenn das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, obwohl das grüne Licht am Sensor leuchtet, bitte den Verriegelungsmechanismus überprüfen
- 